

Instruktion provtagning av saliv med extraktionsvätska

Produkter för provtagning

- Extraktionsvätska för salivprovtagning
- Ren engångsmugg och överföringsstrå (valfritt)
- Provuppsamlingsrör utan tillsats, 4 mL med vit kork

Se nästa sida för information om beställning.



Försköljning
med vatten



Skölj 2 min



Personnummer
Analys
Provtagningsdatum
Beställare

Märk röret nogga



Instruktion – korrekt provtagning är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat

1. Kontrollera patientens identitet. Håll patienten under uppsikt under alla provtagningsmoment. Ta provet innan eventuell peroral medicinerings med substans som ingår i analysen (eller i andra hand minst en timme efter peroralt medicinintag).
2. Låt patienten skölja munnen med vatten innan provtagningen (helst 10 min innan, till exempel före patientsamtal). Var observant på att patienten därefter inte intar något eller har något i munnen.
3. Öppna röret med extraktionsvätska och låt patienten skölja munnen med den gula vätskan i två minuter.
4. Låt patienten spotta i en ren engångsmugg. Om provet är missfärgat, släng det och upprepa steg 2-3.
5. Håll ner provet i provuppsamlingsröret. Fyll ej ända upp! Minsta provvolym är 1,5 mL. Vid användning av överföringsstrå: Sätt strået i muggen med gula delen uppåt. Se till att stråets nedre ände är täckt av provet (håll gärna muggen snett). Tryck ner provuppsamlingsröret på nålen på överföringsstrået.
6. **Viktigt!** Märk röret nogga med personnummer, analys, provtagningsdatum och beställare.
7. Skicka provet till Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg. Skicka helst provet inom ett dygn, annars förvara kylt. Kyltransport till laboratoriet är inte nödvändigt men transporten bör inte ta mer än ett dygn. Emballaget ska vara märkt med biologiska prover kategori B (UN3373).
 - **VGR-provtagare:** Prover och ev. remiss skickas med ordinarie provtransport alternativt som internpost. Prover som skickas med internpost ska packas i transporthylsa och transportpåse/transportlåda (se förslag på nästa sida).
 - **Extern provtagare:** Skicka prov och remiss med post. Se Folkhälsomyndighetens anvisningar [Packa provet rätt \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se). Exempel på godkänd paketering för leverans med normal postgång är transporthylsa och vadderat kuvert, alternativt ytterlåda av kartong med prov i innerpåse med uppsugande material. Skicka provet tillsammans med ifylld remiss ([Remiss 6 Missbruksmedel](#)).
8. Överföringsstrået och engångsmuggen sorteras som *Skärande, stickande och smittförande avfall*.



Instruktion provtagning av saliv med extraktionsvätska

Beställning av produkter för provtagning

Provtagare inom Västra Götalandsregionen

Beställ provtagningsprodukterna från Marknadsplatsen (Sisjödepån). Privata vårdgivare inom VGR når Marknadsplatsen härifrån: <https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/inkop/bestallare/>

Produkt	Leverantör och leverantörens artikelnummer	Marknadsplatsens artikelnummer
Extraktionsvätska för salivprovtagning	Substrat, Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset art nr E731	200000971
Provuppsamlingsrör, vit kork, 4 mL (rör utan tillsats)	Greiner Bio-One art nr 454001	200015280
Överföringsstrå, 8 cm <i>Användning av överföringsstrå rekommenderas men är valfritt.</i>	Greiner Bio-One art nr 450251	200000978
Engångsmugg kartong 120 mL <i>Valfri ren engångsmugg kan användas. Detta är ett exempel.</i>	Pac-Production Sweden art nr 5701011	200009814

Förslag på produkter för provtransport och hantering av avfall:

Produkt	Marknadsplatsens artikelnummer
Transporthylsa	200000937
Transportlåda (kartong)	102796364
Transportpåse (vadderad)	102764396
Transportpåse (bubbelpåse)	200003759
Etikett UN3373 biologiskt ämne kat. B	110994233 alt. VGR18854
Avfallskärl (25L)	110193901
Lock till avfallskärl	110193935

Externa provtagare

Beställ extraktionsvätskan från Substrat, Klinisk Mikrobiologi. Övriga produkter beställs från extern återförsäljare (t ex Hettich Labinstruments AB). Se leverantör och artikelnummer i tabellen ovan.

Beställning av extraktionsvätskan mailas till: substrat.su@vgregion.se

OBS! ange Ämne: *Beställning Extraktionsvätska för salivprovtagning, 4 mL, art nr E731.*

Artikeln beställs i förpackningar om 6 st eller 24 st. Pris: 16,10 kr/st. Fraktkostnad tillkommer.

Vid beställning till substrat.su@vgregion.se, ange:

Antal rör/förpackningar

Kund

Kontaktperson

Leveransadress (gatuadress, ej box-adress)

Fakturaadress

Telefonnummer

Kontaktuppgifter för mer information

Adress: Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bruna stråket 16, 413 45 Göteborg

Tel: Klinisk Kemi Helpdesk 031-342 13 25 alt. Diagnostisk masspektrometri och kromatografi 031-342 40 77.